

陰性証明書付き PCR検査キットのご利用方法

以下の利用手順をお守り下さい。

1 検査の受付とオンライン診療の予約



AC クリニック
お申し込みQR



左の AC クリニックお申し込み QR コードから画面に沿って必要事項をご入力の上、検査の申し込みとオンライン診療の予約を完了してください。

※費用は発生いたしません。


https://pcr.acclinic.jp/entry_with/

重要 入力の際、必ずバーコードシール番号を入力してください。

バーコードシール番号(13桁)

バーコードシール(13桁)の数字を入力
※バーコードシール番号がある場合のみ入力してください。

入力フォームのバーコードシール番号(13桁)の入力欄に番号を入力してください。

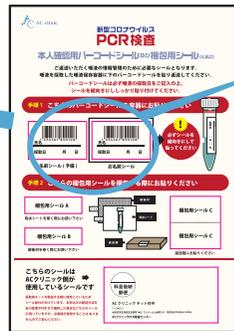

※バーコードシール番号(13桁)は検査キットに同梱されているバーコードシール及び梱包用シールに記載されている13桁の番号の事です。



オンライン診療


予約した日時にオンライン診療を受診して下さい。

※詳細別紙参照



唾液採取

キットの指示書の通りに唾液を採取して下さい。

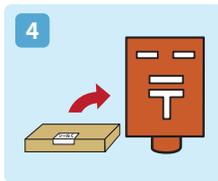

クリニックへ返送

唾液に不活性化剤を入れしっかりと梱包し返送して下さい。



クリニックで検査

検体受領後クリニックで24時間以内に検体を検査をします。



結果報告

メールにて検査結果を報告いたします。

当サービスは検体受領後 24 時間以内の報告通知を心がけております。

携帯電話で迷惑メール対策が行われている方は各キャリアの指示に従って受信できるようにしておいてください。メールが届かない方はお問い合わせ窓口までご連絡ください。



ステータス検索ページで
ご自身の検査状況を検索できます。
<https://pcr.acclinic.jp/result/>

医療法人ひつじ会 AC clinic お客様相談窓口

0120-847-273

月～金 10:00～17:00(土日祝除く)